


# KOMPLEX MEGOLDÁS A DIABÉTESZ MONITOROZÁSÁRA!

Már napi mozgás adatait is rögzítheti a Diabétesz Kliens Program applikációban!

- Automatikus **adatátvitel** **Accu-Chek Instant** vércukormérőből
- **Vércukorérték-, inzulin- és szénhidrátbevitel** digitális naplózása
- **Napi mozgás adatok** naplózása
- Az adatok **grafikonos ábrázolása**
- **7, 14, 30 és 90 napos átlag** vércukormérési eredmények megjelenítése
- **Vércukoradatok megosztása** különböző üzenetküldő alkalmazásokkal
- **Érdekes tartalmak/cikkek és receptek** cukorbetegeknek, valamint egészségtudatos életmódot folytatók számára
- **Folyamatos kedvezmények** a regisztrált tagoknak
- Gyógyszer, recept, szűrővizsgálat és inzulin beadási emlékeztetők
- **Ingyen letölthető** iOS és Android platformokon

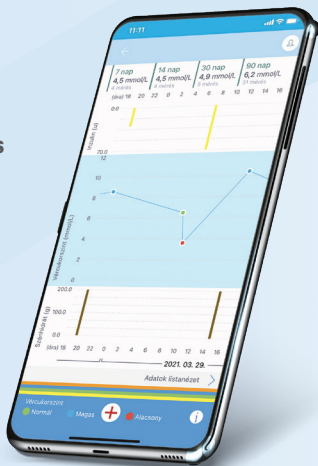

**FRISSÍTSE AZ ALKALMAZÁST  
MOBILTELEFONJÁN, ÉS HASZNÁLJA AZ ÚJ  
FUNKCIÓK NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKET!**



Letölthető az  
**App Store-ból**



SZERZD MEG:  
**Google Play**

ACCU-CHEK® Instant

# A DKP APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA ACCU-CHEK INSTANT VÉRCUKORMÉRŐVEL



1. **Töltse le** a DKP applikációt okostelefonjára (Android vagy iOS platformon); nyissa meg az alkalmazást, **majd regisztráljon!**
2. **Kapcsolja be a Bluetooth® kapcsolatot** mobiltelefonján!
3. A vércukormérő kikapcsolt állapotában, **nyomja meg és tartsa nyomva a vércukormérő be-/kikapcsoló gombját**, amíg a Bluetooth® szimbólum meg nem jelenik. Amennyiben **újabb típusú Accu-Chek Instant** készüléssel rendelkezik, úgy **nyomja meg és tartsa nyomva a vércukormérő jobb oldalán található alsó gombot ▼**, amíg a Bluetooth® szimbólum meg nem jelenik.
4. Indítsa el a DKP alkalmazást, majd a felugró ablakban **engedélyezze az Accu-Chek Instant készüléssel való szinkronizációt és adja meg** a vércukormérő hátoldalán található **PIN kódot!**
5. Amennyiben a párosítás sikeres volt, a vércukormérő képernyőjén megjelenik az OK felirat.
6. Az Accu-Chek Instant vércukormérő által **mért vércukorértékek automatikusan beolvasásra kerülnek** a DKP alkalmazásba.

Webshop és bővebb információ:  
**[www.vercukormeres.hu](http://www.vercukormeres.hu)**


Az Accu-Chek® Instant készülék gyógyászati segédeszköz.

Az Accu-Chek®, Accu-Chek® Instant a Roche bejegyzett védjegyei © 2016 Roche.

A Diabétesz Kliens Program® a Roche Magyarország Kft. bejegyzett védjegye. © 2021 Roche



**Roche Magyarország Kft.**  
1112 Budapest, Balatoni út 2/A

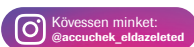

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!