

NYARALÁS ÉS UTAZÁS AZ ACCU-CHEK COMBO INZULINPUMPA RENDSZERREL

A vízhatlanság garanciája

- Az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa adaptere összeköti a patronrt az infúziós szerelék vezetékével, amely részben felel a vízállóságért. Az adapter tetején található két kis fehér nyílás – szelepek – lehetővé teszik a patronrekesz belső és külső oldala közötti légnyomáskülönbség kiegyenlítését. Az adapter nem fog megfelelően működni, ha a nyílások elzáródnak, beszenyeződnek.
- Amennyiben az adapter gumigyűrűje kikopott vagy elhasználódott, és ezáltal például folyadék jutott a pumpába, akkor nem alkalmas a patronház vízmentességét szavatolni. Az adaptert és az elemfedelelet 2 havonta kell cserélni, a pumpa használati útmutatója alapján.
- Az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa standard körülmények között (legfeljebb 60 percig és legfeljebb 2.5 méterig) teljesíti az IPX8-as szabvány támasztotta követelményeket, azaz védelemmel rendelkezik az átmeneti vízbemerülés hatásaival szemben. Ez csak akkor teljesülhet, ha a pumpa burkolata és az úgynevezett kopó alkatrészek is épek, illetve a patron, az adapter és az elemfedél a pumpában vannak. A sós vagy erősen klóros víz azonban károsíthatja a burkolatot.

Mit pakoljon be nyaralására?

- Amennyiben van régi Accu-Chek Spirit és/vagy Combo inzulinpumpája, kapcsolja be és tesztelje le, hogy minden funkciója működik, nézze meg a készülékben rendelkezésre álló üzemidőt és ezt jegyezze fel. A régi készülék tartalék készülékként funkcionálhat. Utazása előtt lehetősége van tartalék inzulinpumpát kölcsönözni. Igényléshez kérjük, hívja ingyenes zöldszámunkat (06-80-200-694), lehetőség szerint utazásának megkezdése előtt min. 4 héttel.
- infúziós szerelék
- Accu-Chek Performa tesztcsík az Accu-Chek Performa Combo készülékhez
- tartalék elemfedél, adapter és elem
- inzulin és működőképés pen (ahhoz az inzulinhoz amit inzulinpumpájában használ)
- bázis inzulin és a hozzá használatos pen (amit az inzulinpumpa előtt használt)
- ujjbegyszűrő készülék
- gyorsan felszívódó szénhidrát (szőlőcukor)
- Glucagon injekció
- orvosi igazolás az inzulin kézipoggyászként való feladásához
- A fent felsorolt eszközöket ajánlott a kézipoggyászbba csomagolni, repülőút esetén

További hasznos tanácsok utazáshoz, nyaraláshoz:

Utazási, nyaralási segédletünkben megtalálja az utazásához szükséges orvosi igazolás sablont és a „Cukorbeteg vagyok” kiskártyát: [LETÖLTHETŐ INNEN](#)

Rövid videónkban összeszedtük, hogy melyek a legfontosabb tudnivalók utazás előtt: [MEGNÉZHETI ITT](#)

Esetlegesen felmerült kérdés esetén, kérjük, keresse illetékes területi képviselőnket, vagy hívja ingyenesen zöldszámunkat.

Bővebb információ: www.rochepumpa.hu

06 (80) 200-694

(A hét minden napján, 0-24 óráig, ingyenesen hívható zöldszám, az inzulinpumpa rendszer leállása és egyéb meghibásodása esetén. Egyéb esetben, munkanapokon 8:30 - 16:30-ig állunk rendelkezésre.)

